

360 Mop Light

使用說明書



MOTIF Beauty equipment 焯絲 - 香港美容儀器有限公司



www.facebook.com/motifequipment

MOTIF®

產品概述

傳統光學儀器祛斑就是一種原理，叫光熱解原理,強脈衝光技術的應用很廣泛，除了傳統的IPL以外還出現了OPT、DPL等更高級的強脈衝光技術。360 mop light它的三大主要技術特點是：IPL,OPT技術升級版,DPL（中文意思為染料脈衝光），360嫩膚系統由飛頓雷射公司開發，2009年在美國上OPT（IPL升級版，中文意思為完美脈衝光），2004年美國科醫人推出的第四代光子嫩膚儀器。360 mop light ,它採用三種不同雷射光子技術,它突破了一個醫學難題，保留了核心OPT完美脈衝技術，採用三維技術概念：能量+脈寬+脈衝波形，真正使發出的脈衝全程能量輸出平穩均一，這是光子技術歷經四代的全新突破。穿透皮膚的能力非常強，能把皮膚深層的吸附在細胞壁上的黑色素細胞激活剝離，被剝離開來的黑色素細胞被提取到皮膚表面被IPL強脈衝光瞬間氣化爆破，通過體表皮膚代謝，另一部分被爆破小分子黑色素細胞通過淋巴微循環代謝出體外。OPT（完美脈衝光）發出的光更穩定、更有效，能真正達到改善膚質的目的。而DPL（染料脈衝光）比IPL作用更精準，主要集中解決面部發紅、色斑問題。所以說360 Mop Light是目前全球唯一一款把磁能量和IPL強脈衝光雙重協同作用最完美的高端儀器，也是目前最完美的面部色素解決方案。



360 Mop Light——祛斑終結者

1、淡化色斑重現光澤

黑色素活性得到有效抑制，數量減少，色斑開始淡化；肌膚底色漸均，光澤度增加，出現一定的細膩度。

2. 色斑顯著減少膚色漸顯透白

黑色素呈遊離態排出肌膚表層，色斑明顯消除，暗沉肌膚得到全面改善，膚色明顯得到提亮，漸顯透白。



三、主機介紹

OPT（完美脈衝光）發出的光更穩定、更有效，能真正達到改善膚質的目的。而DPL（染料脈衝光）比IPL作用更精準，主要集中解決面部發紅、色斑問題。

四、操作界面

4.1、開機界面



4.2、功能選擇界面

脫毛操作界面


嫩膚操作界面

設置界面




圖二

4.3、操作界面

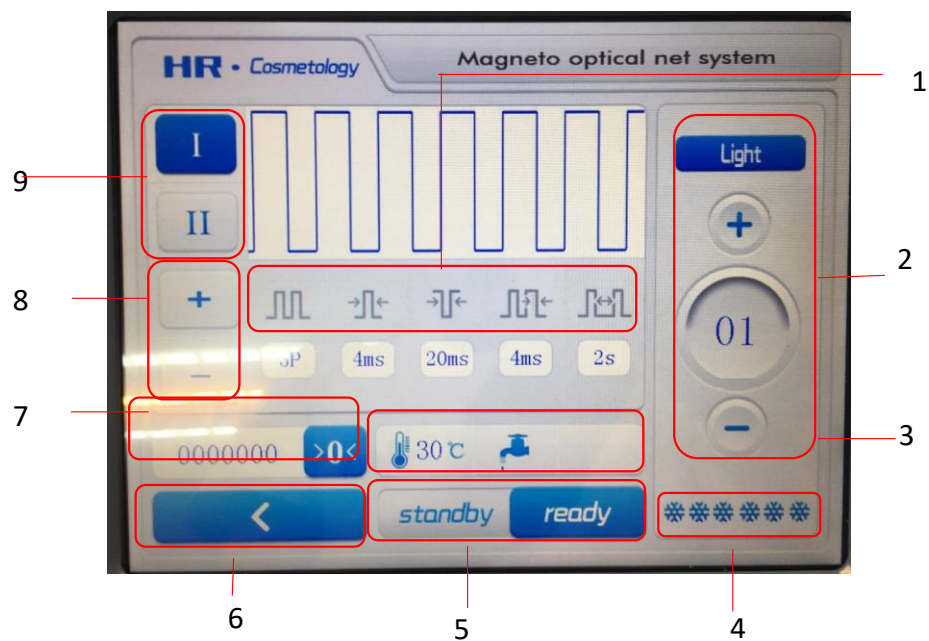

圖三

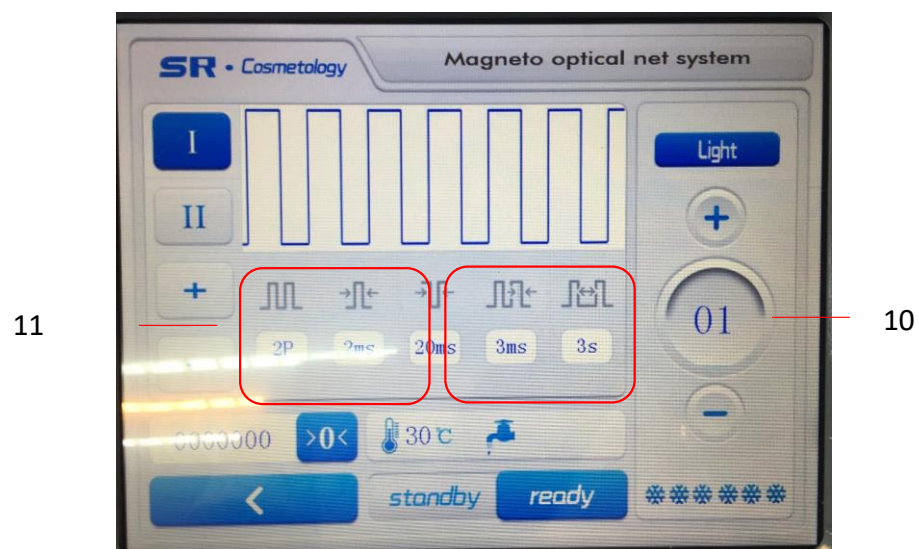

- 1、脈寬選擇：當按下模式I時，區域1顯示如三所示，可根據需要選擇脈寬；
- 2、光能量：調節光強度，調節範圍1——50，使用時可從低調起，根據用戶需要調節；
- 3、顯示溫度和水流狀態；
- 4、調節冰封強度，有6個等級；
- 5、準備/待機：開始或停止工作；
- 6、返回按鍵：可返回至功能選擇界面；
- 7、光頭計數：累計光頭出光次數；
- 8、加減調節按鈕：調節圖四中10頻率、11脈沖；
- 9、模式選擇：按I界面如圖三所示，按II界面如圖四所示；
- 10、頻率：使用8加減調節按鈕，調節頻率，範圍0——10Hz；
- 11、脈沖：使用8加減調節按鈕，調節脈沖，範圍0——8ms。

4、護理後注意事項：

- 1) 不得使用美白刺激功效性產品；
- 2) 七天內不能用熱水洗臉,不能蒸桑拿；
- 3) 注意防曬；

產品服務與維修

對以下使用個人原因造成的故障，不提供免費保修服務。擅自拆裝，改裝本產品造成的故障；

使用不慎摔打，跌落而造成的故障；

因缺乏合理保養而造成的故障；沒按使用說明的正確指導而造成的故障。

五、儀器注意事項：

- 1) 本儀器為美容院專用，不適用於家庭用戶使用。儀器需專業的美容師操作，非專業人員操作可能引起不必要的傷害。
- 2) 請勿拆解本公司儀器或試圖進行本說明書中未加以說明的操作。所有的維修工作均須由本公司認可的專業維修員進行。
- 3) 請勿在水源附近或當您的手濕時安裝或操作儀器，小心不要讓液體濺潑到儀器上。
- 4) 如果出現下列情況，請將儀器從電源插座上拔下，並與專業維修站聯系。
- 5) 儀器發出異味，冒煙或發出不正常的噪音；
- 6) 電源線擦破或損壞；
- 7) 請在使用結束後拔下電源線，以確保安全。
- 8) 請勿將儀器放置在不穩的推車、架子或車子上，如果翻倒，儀器可能會嚴重損壞。特別注意不要手拿護理頭拖動儀器。
- 9) 為延長本機使用壽命，連續開關機間隔必須在1分鐘以上。儀器連續工作時間不應超過2個小時好每工作1個小時後，關機並拔掉電源，使儀器休息20-30分鐘。
- 10) 本公司有權在未事先通知的情況下對本手冊提供的信息進行修改。本公司對所述信息保留解釋權。

六、儀器使用注意事項

為了使用和服務項目的有效性特別作出如下指導：

- 1) 儀器打開包裝後一定要從註水口加入蒸餾水後方可使用；水箱加滿標準：溢水口有水流出即為加滿。

提醒：

- 2) 加水時溢水口必須打開；
- 3) 系統設置選項中察看槍頭的總使用次數,達到300000次即應更換槍頭；即使能夠出光，但是光譜已經脫失，難以保證服務項目效果。請及時更換槍頭。
- 4) 每次能量調節都必須安全的能量開始，避免搞能量造成皮膚燙傷。能量調節標準：以皮膚有明顯的熱感為能量調節值標準。

七、操作注意事项

在使用次儀器之前，請務必仔細閱讀以下內容。

如不嚴格遵守使用規則與注意事項，也許將不會達到您所希望的成效。如果您想改變的地方沒有進展，或對此儀器有任何疑問，請盡快諮詢您的醫生。使用成果可能會因您的年齡、生活習慣（運動方式、飲食等）和生活態度有關。

1) 護理過程中，如果身體感到疼痛，嚴重的發紅現象，請立即停止護理。護理過程中皮膚稍微發紅或留下痕跡屬正常現象，半小時後會自動退紅。

2) 不要將此儀器使用於佩戴珠寶或耳環等首飾的部位。

3) 體內含有金屬物者（金絲植入者或體內含有有鋼釘、心臟起搏器等）請勿使用此儀器。

4) 心臟病犯者不宜使用儀器理療。

5) 如果有發燒、感染、發炎、皮膚病（濕疹、皰疹）、疣、未或剛結疤傷口、嚴重與慢性疾病（癌癥、艾滋病、血液性疾病等）或凝血問題，禁止使用此儀器。

6) 如果有靜脈炎、在兩個月之內剛進行靜脈手術（或靜脈硬化）、有嚴重的靜脈曲張或肢體發麻請不要使用此儀器。如有疑問，請先諮詢您的醫生。

7) 孕婦禁止使用此儀器。

8) 除非醫生指示，否則此儀器不應使用於耳朵、口腔內部，也不應該使用於乳頭上。

9) 癲癇患者，禁止使用此儀器。患有精神疾病者，禁止使用此儀器。

10) 如果您長期服用抗炎、抗凝結劑、抗生素、抗組織胺等藥物，或您的皮膚會因為輕微碰撞而有瘀傷情況，在使用此儀器前，請先諮詢您的醫生。

11) 接受過任何整形手術後，均可使用此儀器，但必須遵照醫生指示。

12) 本機設計有獨立安全電路，當水溫過高時可切斷電路。緊急需要時可通過紅色急停開關快速切斷電源。


【警告】

- 1) 任何強光發射裝置只要使用不當都會引起人身傷害。此設備運行時會產生高壓，操作強光裝置的人員應時刻保持警惕，採用必要的防護措施。
- 2) 被護理者：在接受強光護理時應對眼睛進行保護。護理時戴上本機的防護眼罩。在接受 360 Mop Light美容護理時，必須在相應的護理部位上塗抹適量的凝膠，保護皮膚組織。
- 3) 操作人員：在護理過程中應佩帶強光防護鏡。

註：操作人員即使佩帶有防護鏡，也不可直視從光護理頭中發出的強光。
- 4) 護理室：護理室內應清晰地標明正在使用高強度光。
- 5) 光導晶體應始終保持清潔。不要讓凝膠滲入光護理頭內部。。
- 6) 若能量強度設置不當，向護理部位發射過量的光能，可能引起皮膚的熱損傷，從而造成組織增生和(或)萎縮和(或)皮膚異常色素沉著。請根據客戶情況，設置好的參數及能量。
- 8) 強光可能損傷眼睛和引起火災或燒傷在使用時應採取一切必要的防護措施。
- 9) 不使用時，護理頭應放在掛鉤上，護理時應指向手護理部位。
- 10) 物體吸收光能後溫度升高。應採取預防施，減少引燃護理區域內或附近的易燃物的危險。
- 11) 實施護理前皮膚處理時請不要使用酒精或丙酮易燃物，如有必要請使用醫用清潔液。
- 12) 如果使用了酒精清洗過護理光頭或給它的任何部件消毒，必須乾透後才可工作。
- 13) 不可在存有易燃性麻醉劑與空氣，或一氧化氮混合物的環境中使用本機。

維護指引


1)、

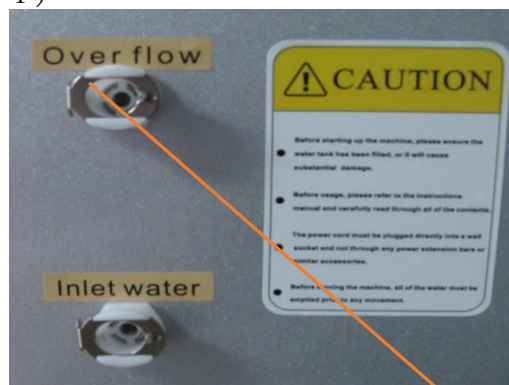

短膠喉, 必要吐水才可停止灌水

長膠喉連漏斗, 也是放水

2)、

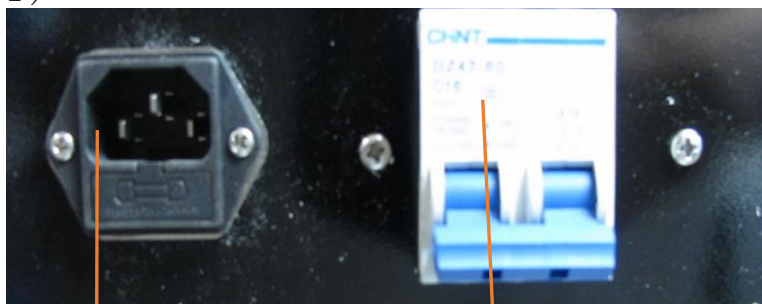

機身背面, 電源線位置

電源總開關制

3)、



操作開關

緊急安全制