

Focused Heat

使用說明書



MOTIF Beauty equipment 焗絲 - 香港美容儀器生產公司



FOCUSED HEAT

www.facebook.com/motifequipment

MOTIF[®]

目錄

光學介紹

產品概述	P.2
------	-----

Focused Heat介紹

Focused Heat 聚焦射頻技術	P.3
---------------------	-----

原理	P.4
----	-----

探頭	P.5
----	-----

針對問題	P.6
------	-----

治療	P.7
----	-----

使用步驟	P.8
------	-----

不適宜人群	P.9
-------	-----

安全事項	P.10
------	------

維護指引	P.11
------	------

產品概述

是全球新一代無創緊膚除皺技術

射頻輸出頻率：40.68MHz 輸出模式：單極



Focused Heat 聚焦射頻技術

Focused Heat 聚焦射頻技術原理 Focused Heat將射頻波外部頻率進行調制，同時研發應用高頻射頻移相器，通過“波形壓縮”及“相位移動”兩個步驟，將射頻波能量精準聚焦在皮下特定深度，稱為市場上唯一做到“精準加熱，分層抗衰”的射頻緊膚技術。聚焦射頻有效提拉以往手術拉皮才能到達的SMAS筋膜層，單次治療即可得到“提拉+緊膚+祛皺+溶脂”的立體抗衰效果。



原理

Focused Heat在保證內部調整頻率40.68MHz不變的前提下，通過提高外部調制頻率，壓縮射頻正弦波波形，使射頻波震蕩中心熱作用更集中，能量更聚焦。

Focused Heat特別設計及研發了高頻射頻移相器，通過射頻波的相位調整，雷達式定位導航，精準控制相位移動在皮下不同層次，完美解決了傳統射頻穿透深度不可控的問題。




探頭

探頭熱作用深度可調，可精準選擇性加熱真皮層或SMAS筋膜層；冷熱時間自由調節，療效及患者舒適度達到最優配比，多點接觸式製冷及真空負壓裝置大，無需定期更換冷媒，確保表皮安全，手具發射次數無任何限制，美容師可以自由增加治療次數。



針對問題

- 1、祛除皺紋
- 2、緊致皮膚
- 3、提升皮膚彈性
- 4、收緊粗大毛孔
- 5、改善暗啞肌膚

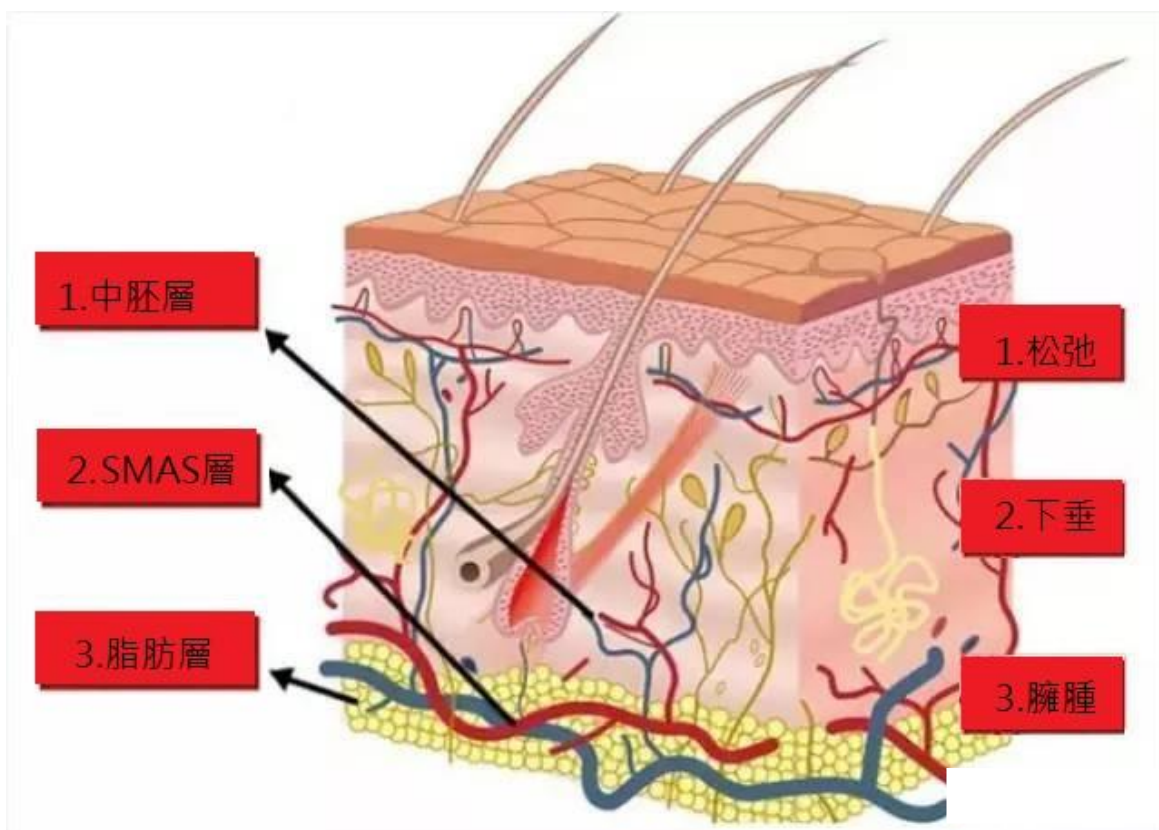


Focused Heat治療

Focused Heat能夠準確的將射頻能量作用於真皮淺層，熱作用促進淺層膠原纖維即刻收縮，促進皮膚結構立刻拉緊，出現即時的緊緻效果。皮膚真皮被加熱后，不斷刺激膠原再生，使皮膚彈性逐漸恢復，達到提升皮膚活性、減少皺紋的目的。

Focused Heat能夠將射頻能量選擇性作用於真皮深層，熱作用誘發真皮內的創傷愈合反映，促進真皮纖維母細胞不斷釋放膠原蛋白，新膠原不斷合成，排列更緊密，受損的膠原層得到補充，促進真皮重建和增厚，達到喚醒皮膚彈力，持久緊緻皮膚的目的。


SMAS層是影響面部皮膚衰老的真正根源，Focused Heat可將能量精準作用於SMAS層，通過熱效應促進彈性膠原持續再生，并構建全新的彈性纖維網，促進深層筋膜組織拉緊并提升，有效提拉鬆弛的面部線條，達到筋膜懸吊拉皮的效果。



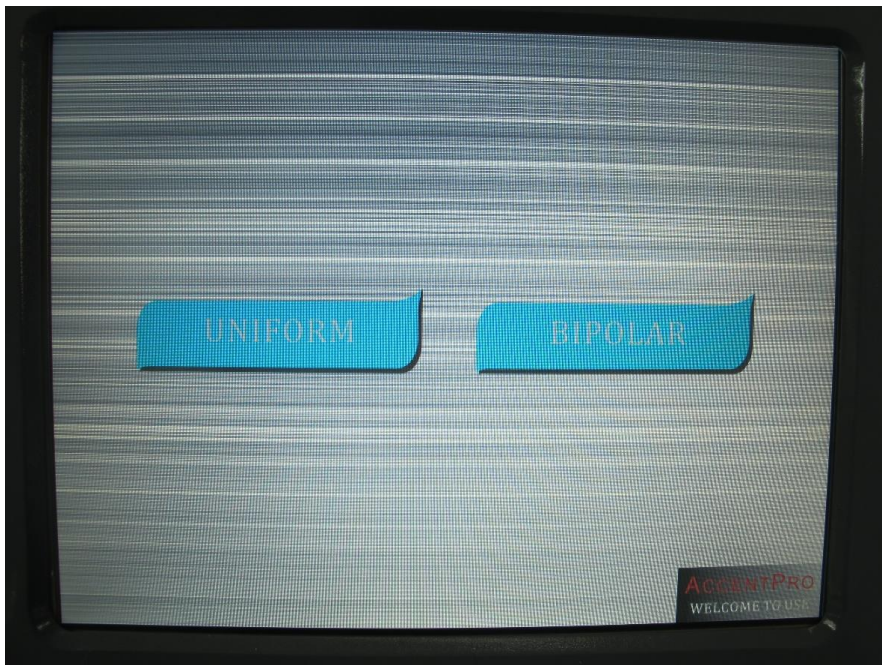

Step 1

Bipolar - 吸拉使用

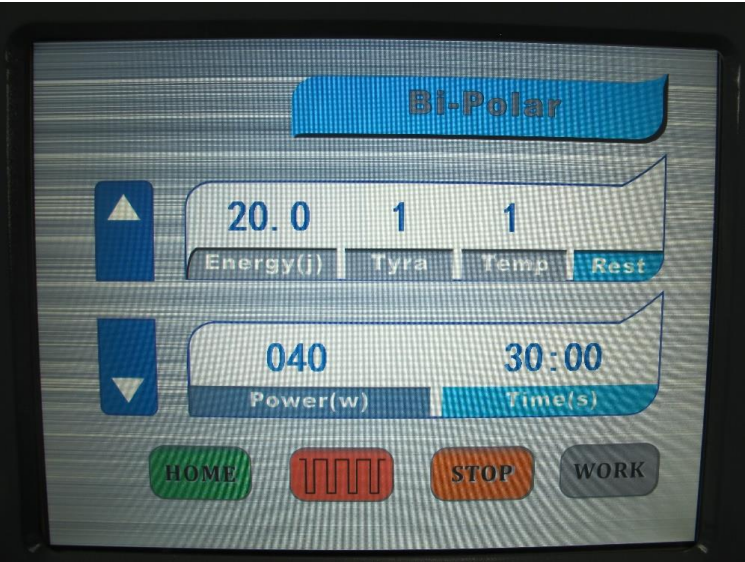


臉

身體

Energy (j) 40.0起	Energy(j) 60.0
Tyra 1	Tyra 3
Temp 2	Temp 3
Power(w) 080起	Power (w) 120起
Time(s) 15:00	Time(s) 25:00

Step 2

Uniform - RF槍使用

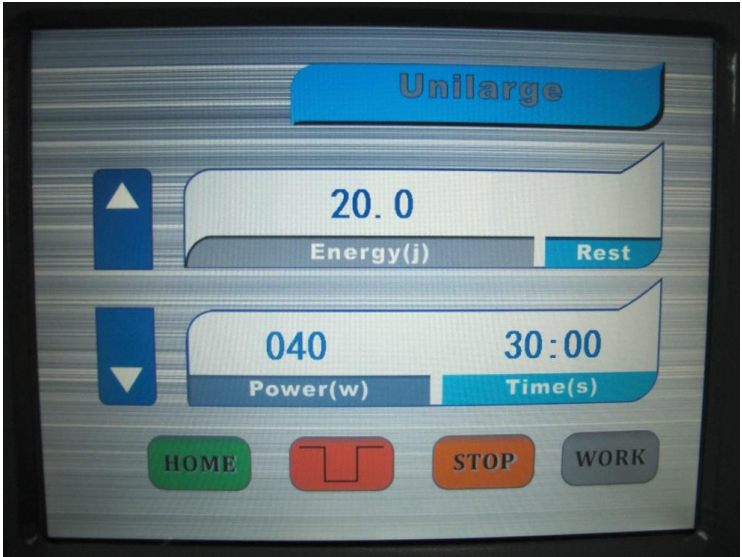

臉

身體

Energy (j) 40.0起	Energy (j) 60.0起
Power (w) 080起	Power(w) 120起
Time(S) 15:00	Time(s) 25:00

使用步驟

- 1.清潔皮膚。
- 2.插好儀器電源，打開電源開關
- 3.塗上潤膚油,使用適用的擦探頭,在客人臉上試感覺(度數開始為 40j UP)
- 4.操作過程中可了解客人的接受程度而向上調高能量.(每次為100度上)
- 5.為客人使用面膜15分鐘
- 6.適宜每二星期一次療程

不適宜人群

- 1、體內植入心臟起搏器或其他相似電子裝置的人。
- 2、懷孕的女性。
- 3、過去9個月內服用口服異維甲酸治療的人(Accutane / Roaccutane / Oratane)。
- 4、內部有填充物，若面部有金絲植入，不建議做。
- 5、嚴重心臟病、糖尿病、甲亢患者。
- 6、手術傷口未癒合者。
- 7、腫瘤晚期患者。
- 8、對效果抱有不切實際幻想者。

安全事項

1、搬運安全

本操作系統內存精密儀器，用戶盡量不要遠距離移動此機器。運

輸過程中必須使用原廠提供的減震包裝，否則可能導致系統的失調，

影響能量輸出

2、電氣安全

本操作系統使用單相220V 電源，最大輸出電流不大於10A。

為了使機器使用壽命加長，減少電網波動對本機器的影響，用戶需使

用1000W 的穩壓器。

3、操作安全


隨時保持系統清潔並確保冷凝劑不污染系統

4、系統安全裝置

為了保證使用安全，本產品嚴格執行 (光電)企業標準

開機後立即檢查電路是否安全，並且整個操作過程中應不斷檢查電路


1)、

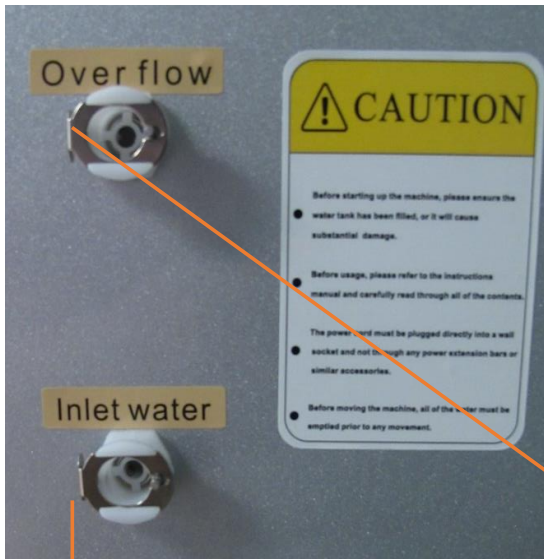

短膠喉, 必要吐水才可停止灌水

長膠喉連漏斗, 也是放水


2)、

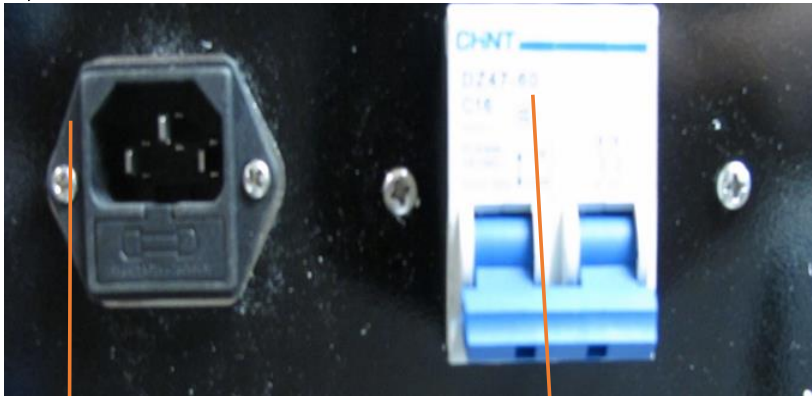

機身背面, 電源線位置

電源總開關制

3)、

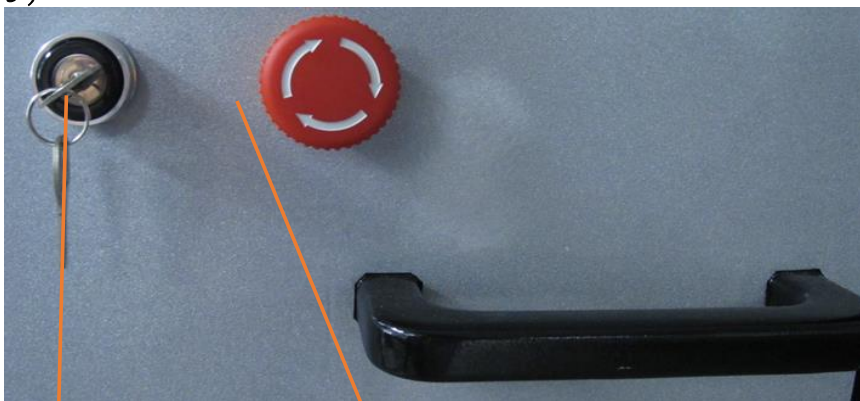

操作開關

緊急安全制